


操作方法・判定方法

検体 尿

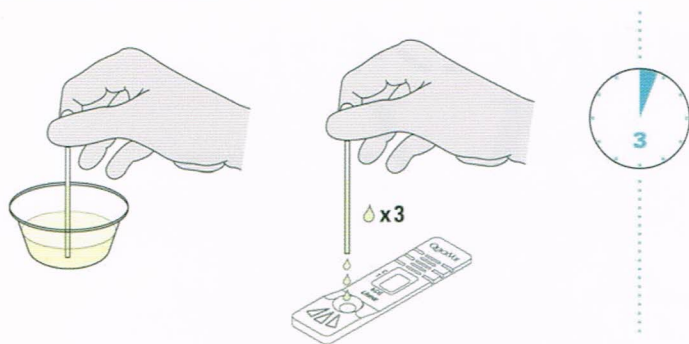

ディスポーザブルピペットに検体を取り、テストカセットのサンプルウェルに3滴加えます。

3分後に結果を目視判定します。



陽性：青色のコントロールライン(C)と同時に赤色のテストライン(T)が現れる。

陰性：青色のコントロールライン(C)が現れ、赤色系のテストライン(T)が現れない。

無効：青色のコントロールライン(C)が3～5分間現れなかった場合、検査結果は無効とする。

参考データ：相関性試験

既承認品体外診断用医薬品との比較

		既承認品体外診断用医薬品	
		陽性	陰性
クイックビュー ワンステップ hCG test	陽性	36	0
	陰性	0	14

感度 = 100% 特異度 = 100% 一致率 = 100%

既承認品体外診断用医薬品との相関性については、感度(陽性率)、特異度(陰性率)及び一致率は、それぞれ100%であった。

最小検出感度：尿中のhCG濃度 25 mIU/mL

製品概要

使用目的	尿中のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)の検出
測定原理	免疫クロマトグラフィー法
有効期間	18ヵ月
貯蔵方法	室温
反応時間	3分
保険収載名	ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性
判断料	生化学的検査(II) 144点
実施料	55点

製品名	クイックビュー ワンステップ hCG test
カタログ番号	20109
包装	25回
キット構成 (各25個)	テストカセット ディスポーザブルピペット(付属品)
希望小売価格	6750円(税抜)



製造販売元

フィンガルリンク株式会社

〒111-0041 東京都台東区元浅草 2-6-6 東京日産台東ビル

Tel. 03-6802-7145 Fax. 03-6802-7156

E-mail: ivd_info@finggal-link.com

外国製造業者 Quidel Corporation (米国)

販売元 ~win-win から happy-happy ~

WB & D T 協和メディシード株式会社

〒530-0022 大阪市北区浪花町 4-1 7

お問合せ info@kyowa-mediceed.co.jp

TEL/FAX 06-6147-2392/06-6147-2393