



IPライン® デュオ「ノロ・ロタ」

糞便中のノロウイルス及びロタウイルスを同時測定可能なキットです。

◆操作方法

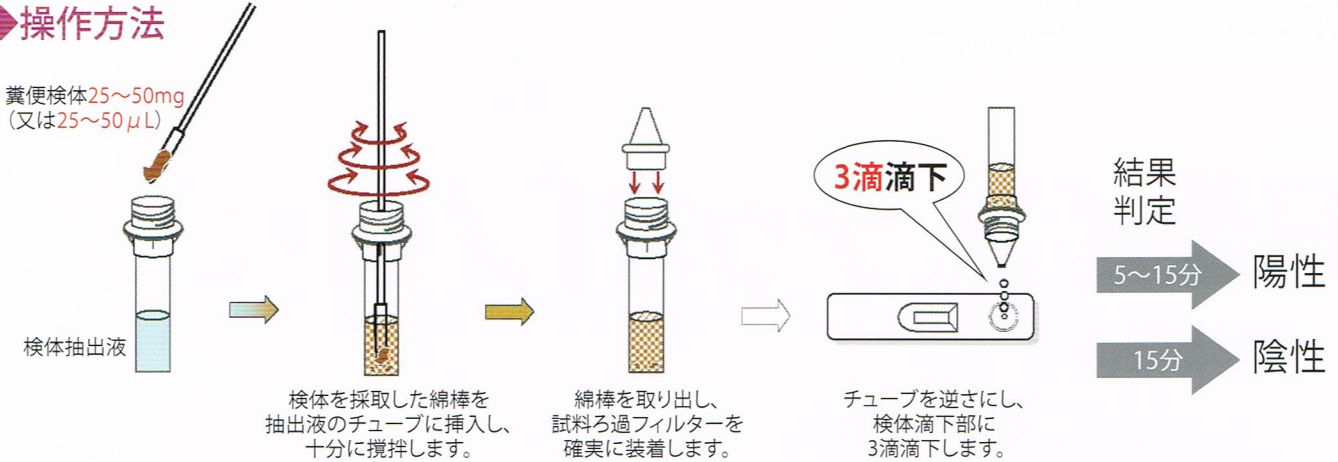

◆判定方法

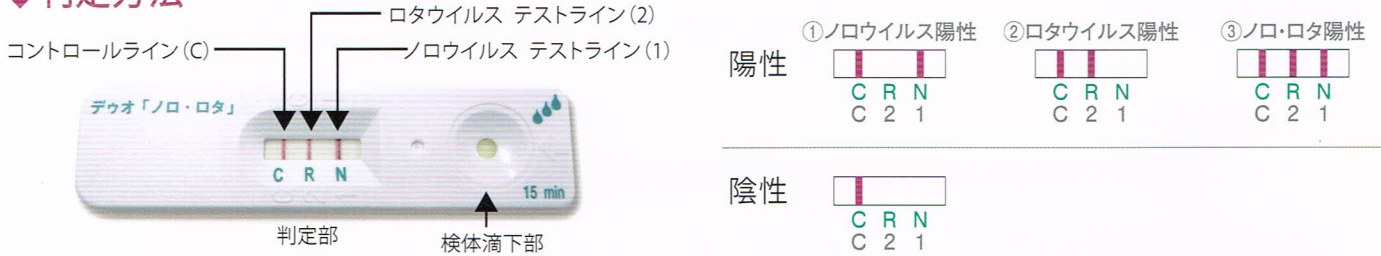

◆相関性試験成績

ノロウイルス		対照品A (IC法)			陽性一致率: 100.0% (56/56) 陰性一致率: 93.8% (60/64) 全体一致率: 96.7% (116/120) ※1 RT-PCR法 4例全て陽性
		陽性	陰性	計	
本品	陽性	56	4 ^{#1}	60	
	陰性	0	60	60	
	計	56	64	120	

ノロウイルス		対照品B (EIA法)			陽性一致率: 96.7% (59/61) 陰性一致率: 85.2% (69/81) 全体一致率: 90.1% (128/142) ※2 RT-PCR法 2例全て陰性 ※3 RT-PCR法 12例全て陽性
		陽性	陰性	計	
本品	陽性	59	12 ^{#3}	71	
	陰性	2 ^{#2}	69	71	
	計	61	81	142	

ロタウイルス		対照品C (IC法)			陽性一致率: 93.3% (56/60) 陰性一致率: 98.3% (59/60) 全体一致率: 95.8% (115/120) ※4 RT-PCR法 4例全て陰性 ※5 RT-PCR法 1例全て陽性
		陽性	陰性	計	
本品	陽性	56	1 ^{#5}	57	
	陰性	4 ^{#4}	59	63	
	計	60	60	120	

ロタウイルス		対照品D (EIA法)			陽性一致率: 98.2% (54/55) 陰性一致率: 95.8% (68/71) 全体一致率: 96.8% (122/126) ※6 RT-PCR法 1例全て陰性 ※7 RT-PCR法 3例全て陽性
		陽性	陰性	計	
本品	陽性	54	3 ^{#7}	57	
	陰性	1 ^{#6}	68	69	
	計	55	71	126	

◆製品概要

測定原理	イムノクロマトグラフィー法	
使用目的	糞便中のノロウイルス抗原及びロタウイルス抗原の検出 (ノロウイルス感染及びロタウイルス感染の診断の補助)	
有効期間	18ヶ月	
貯蔵方法	1~30℃	
保険点数	ノロウイルス抗原定性150点 ロタウイルス抗原定性 65点	判断料 144点
判定時間	5~15分	

カタログ番号	IPL0001
JANコード	4582350890051
包装単位	10テスト
希望小売価格 (税別)	15,000円

< ※主な検査の所定点数のみ算定が可能です。 >



製造販売元
株式会社 イムノ・プローブ
〒355-0225 埼玉県比企郡嵐山町鎌形1331-3
TEL : 0493-62-6923 FAX : 0493-62-9477
フリーダイヤル : 0120-626-923
E-mail : info@immuno-probe.com

販売元 ~win-win から happy-happy へ~
WB&DT 協和メディシード (株)
E-mail: info@kyowa-mediceed.co.jp
TEL : 06-6147-2392
FAX : 06-6147-2393